

Dr Clean

100 db

Fertőtlenítő tisztítókendő

Általános leírás

Kisebb és nagyobb felületek letörléses fertőtlenítésére egyaránt alkalmazható kendő.

Alkalmazási terület

- ★ Egészségügy területén
- ★ Közintézményekben
- ★ Iskolákban
- ★ Vendéglátás területén
- ★ Élelmiszeriparban
- ★ Állatorvosi rendelőkben
- ★ Fogorvosi rendelőkben

Tulajdonságok

- ★ Alkalmas egy munkafázisban történő fertőtlenítő tisztításra
- ★ Gyors és kiváló fertőtlenítő hatás
- ★ Alkoholmentes
- ★ Aldehydmentes
- ★ Klorid mentes
- ★ Egyszerű alkalmazhatóság
- ★ Fémeket nem korrodálja
- ★ Kendő méret: 135x240 mm
- ★ Kendő anyaga: polipropilén (20 g/m²)

Hatóanyag: N,N-didecil-N,N-dimetil-ammóniumklorid

Hatásspektrum

- ★ Baktericid
- ★ Fungicid
- ★ Virucid (HIV, HBV, Rota-, Poli-, Adeno-, Noro- és H1N1/H5N1 inaktiváló hatású is)

Alkalmazási koncentráció és behatási idő:

Baktericid hatás: behatási idő 5-10 perc

Fungicid hatás: behatási idő 15 perc

Virucid hatás: behatási idő 30 perc

Az előírt behatási időtartam alatt a fertőtlenítendő felületet folyamatosan nedvesen kell tartani.

A fertőtlenítés végrehajtása

A doboz fedelét nyissuk ki, és a kilógó kendővéget erőteljesen húzzuk ki. A kendő a perforációnál le fog válni.

A letépett kendővel a tisztítandó és fertőtlenítendő területet jól dörzsöljük át. Az első felnyitáskor az origináló fóliát el kell távolítani.

Dr Clean



MOLAR
CHEMICALS KFT



DR CLEAN

Tárolás, eltarthatóság

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, 5-25 °C között 18 hónapig tárolható.

Felbontás után 2-3 hónapig tárolható

Engedélyszám: OTH 2456-4/2011

A készítmények alapanyagait szigorúan ellenőrzött forrásokból szerezzük be. A teljes gyártási folyamat során érvényes tanúsítással rendelkező GMP, ISO 9001:2008 és ISO 13485 (orvostechikai eszköz) minőségbiztosítási rendszereket működtetünk.

Forgalmazza:
MOLAR CHEMICALS KFT.
2314 Halásztelek, Árpád utca 1.
Tel.: +36-24 527-100 • Fax: +36-24 527-127
Email: ertekesites@molar.hu • www.molar.hu