

Germimed Plus

1 liter
5 liter

Folyékony felületfertőtlenítőszer koncentrátum
és mosogatószer



Általános leírás

A GERMIMED PLUS kvaterner ammóniumvegyületet tartalmazó, széles antimikrobiális spektrummal rendelkező, tisztítóhatású fertőtlenítőszer. A GERMIMED PLUS csaknem színtelen, enyhén viszkózus, jellegzetes szagú készítmény, amely mosható felületek egy munkafázisban elvégezhető tisztítására és fertőtlenítésére alkalmas. A készítmény erőteljes szennyoldó és szennylazító hatással is rendelkezik, ezért különösen ajánlott olyan esetekben, amikor erősen szennyezett felület egyidejű tisztítására és fertőtlenítésére van szükség. **Használható mosogatószerként kézi és gépi mosogatáshoz is!**

Alkalmazási terület

Egészségügyi intézményekben (kórházakban, rendelőintézetekben, stb.), idős otthonokban, szociális otthonokban, állatorvosi rendelőkben, óvodákban, iskolákban és egyéb közintézményekben, élelmiszeripar és vendéglátás területén, fitness és kozmetikai szalonokban alkalmazható mosható fal- és padlóburkolatok, illetve vizes egységek, berendezési, felszerelési tárgyak felületeinek egy munkafázisban történő tisztító hatású fertőtlenítésére.

Tulajdonságok

- Erőteljes szennyoldó és szennylazító hatással rendelkezik
- Alkalmas egy munkafázisban történő fertőtlenítő tisztításra
- Aldehydmentes

Összetétel

N,N-Didecil-N,N-dimetil-ammónium-klorid (9,0 %); Nemionos tenzid(5-7 %); Nátrium-karbonát(1-2 %); Nátrium-metaszilikát (0,4-0,8 %); Nátrium-tetraborát (0,4-0,8 %);propán-2-ol (1-3 %) EDTA-di-nátrium-só-di-hidrát (1-3 %); Víz (82-86 %)

Hatásspektrum

- Baktericid (MRSA is)
- Fungicid
- Virucid (Hepatitis B és HIV inaktíváló)
- Tuberkulocid

A fertőtlenítő munkaoldat készítése

Az erre a célra használt, megfelelő nagyságú edénybe 10 liter 40 °C- nál nem melegebb csapvizet töltünk és hozzáadjuk a kimért térfogatú fertőtlenítőszeret, mely pl. 2 tf%- os oldat készítése esetén 2 deciliter, 1 tf %- os oldatnál 1 deciliter, stb. A munkaoldatot mindig a felhasználás előtt, frissen kell készíteni.

Alkalmazási koncentráció és behatási idő

Általános fertőtlenítés esetén

	1 %- os oldatban	30 perc behatási idő
	2 %- os oldatban	25 perc behatási idő
	3 %- os oldatban	15 perc behatási idő
nyers fa felületeken	1 %-os oldatban	60 perc behatási idő
nyers fa felületeken	2 %- os oldatban	45 perc behatási idő
nyers fa felületeken	3 %- os oldatban	30 perc behatási idő

Magas fehérje szennyezés esetén

3 %-os oldatban 30 perc behatási idő

Virucid hatás eléréséhez

(HBV/HIV inaktíválás) 3 %-os oldatban 30 perc behatási idő

Germimed
Plus

Tuberkulocid hatás eléréséhez

1%-os oldatban

15 perc behatási idő

A fertőtlenítés végrehajtása

A tisztítandó és fertőtlenítendő felületre szivaccsal, kefével vagy más alkalmas eszközzel visszük fel a GERMIMED PLUS munkaoldatot, majd a mechanikus tisztítást is alkalmazva a megfelelő behatási idő elteltéig a felületen hagyjuk, illetve hagyjuk rászáradni. Az emberi bőrrel, élelmiszerrel érintkező felületeknél a behatási idő letelte után alapos csapvizes öblítést alkalmazunk.

Figyelmeztetés

Más tisztító-, és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!

Tárolás, eltarthatóság

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös helyen, fénytől, hőtől védve, fagymentes helyen 3 évig eltartható.

Kiszerezés

- 1 liter (polietilén flakon, 10x1 gyűjtőzve)
- 5 liter (polietilén kanna)

Engedélyszám: JKF/10887-5/2016

A készítmények alapanyagait szigorúan ellenőrzött forrásokból szerezzük be. A teljes gyártási folyamat során érvényes tanúsítással rendelkező GMP és ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszert működtetünk.